

Anéolia desarrolla y fabrica instrumentos de análisis para proteger mejor sus productos envasados



abiss

Una marca de Anéolia

## ¿Cuáles son las ventajas de Mercury 2024?

- Ahorra tiempo gracias a un sensor de O2 5 veces más rápido que las generaciones anteriores de equipos Abiss
- Cumple las últimas normas reglamentarias para la monitorización de redes de fluidos médicos
- Equipo portátil que se entrega en una maleta para facilitar los viajes.

## ¿Cómo pueden controlarse las redes de gas en un entorno médico?

El Mercury de ABISS® es un analizador de oxígeno y presión con detección opcional de CO2 para la comprobación de redes de fluidos médicos (comprobación de tomas de pared en habitaciones, quirófanos, etc.).

Diseñado y fabricado íntegramente en Francia, este dispositivo comprueba que el fluido médico está conectado a la toma de pared correcta e identificada.

Se utiliza en centros de rehabilitación, hospitales y clínicas, residencias de ancianos, ...

... este analizador de gases y detector de fluidos médicos cumple la norma NF EN ISO 7396-1, que los instaladores deben utilizar para el control final de sus trabajos.

Equipado con una batería recargable, este aparato es autónomo. Tras 5 minutos de inactividad, el aparato pasa automáticamente al modo de espera para preservar la batería.

Las capacidades del Mercury se han mejorado con el uso de un sensor de O2 5 veces más rápido que en las generaciones anteriores.

## ¿Cómo funciona?

### MERCURY 2024

- 1
- 2
- 3

1 Encienda el aparato y conecte la boquilla correspondiente a la toma de corriente.



2 El dispositivo indica el resultado de O<sub>2</sub>, la presión y el fluido detectado

3 Retire el enchufe de la toma de corriente y el aparato estará listo para una nueva prueba.

## Recomendaciones de uso

Para proteger su aparato, le recomendamos que sustituya regularmente los filtros de las mangueras para evitar que entren impurezas en el aparato.

## Especificaciones técnicas

Para ver todas las especificaciones técnicas del MERCURY 2024, escanee este código QR, o visite nuestro sitio web : [www.aneolia.com](http://www.aneolia.com)

